



Comprobaciones previas al uso:

- **La fijación trasera de la silla se encuentra correctamente bloqueada, con el pasador puesto a tope.**
- **Los clips de sujeción están a tope y fijan correctamente los flotadores.**
- **Los clips de sujeción están a tope y fijan correctamente las ruedas.**
- **No existe peligro para el usuario/a ni para el resto de usuarios/as**

Normativa de uso:

- **La silla anfibia no debe usarse con oleaje.**
- **La silla sólo podrá usarse para las personas con movilidad reducida.**
- **Por seguridad tiene que haber al menos una persona, además del usuario/a, sujetando la silla durante el uso.**
- **La entrada y salida del agua tiene que ser realiza con ayuda de un acompañante del usuario/a.**
- **El acompañante que vaya a manipular la silla debe conocer su uso y tener condiciones adecuadas para ello, ya que la silla esta en rampa y se necesita de esfuerzo físico.**
- **Para mayor estabilidad se recomienda entrar y salir del agua de cara o espaldas a la piscina.**
- **El personal de la instalación no está obligado manipular la silla para entrada y salida del agua.**